

# Desinfektionsmittel PeraSafe™

## Dosierungs-Info



– für H<sub>2</sub>-Atemtestgerät LactoFAN / MicroH2 –

Das kleinste Gebinde (Schraubgefäß mit Dosierbecher) enthält 81 g PeraSafe™-Pulver.

Diese Menge ergibt 5 l Arbeitslösung; das entspricht 16,2 g/l:

Lösungsvolumen		Pulver-Masse
1,0 l	1000 ml	16,2 g
0,5 l	500 ml	8,1 g
0,2 l	200 ml	3,2 g
0,1 l	100 ml	1,6 g

1 gestrichener Teelöffel ≙ ca. 2,5g PeraSafe™

1 gestrichener Esslöffel ≙ ca. 6,5g PeraSafe™

Für den üblichen Gebrauch im Becherglas sind folgende Volumina praktikabel:

LactoFAN-Teil	Mundstück-adapter	T-Stück	2x Mundstück-adapter	Mundstückadapter + T-Stück
empfohlenes Lösungsvolumen	100 ml	200 ml	200 ml	200 ml
erforderliche Menge PeraSafe™	1,6 g	3,2 g	3,2 g	3,2 g
mögliche Ansätze pro 81g-Gebinde	50	25	25	25

Bitte beachten Sie beim Einsatz von PeraSafe™ die Sicherheits- und Lagerungsvorschriften des Herstellers.